

Komplet løsning til sikker oxygenbehandling

Med Compact er medicinsk oxygen altid tilgængelig takket være flow ventil, regulator og mini kobling integreret i hættten, der dækker gasflasken. Alt er på plads fra starten, så patienten kan tilføres medicinsk oxygen uden forsinkelse, enten via en konstant tryk fra lynkobling eller med forudindstillet flow via en nippel. Flasken er ergonomisk og sikkert designet, hvilket gør det lettere for sundhedspersonalet at håndtere. Regulator, flowmeter og mini kobling kontrolleres af Air Liquide derved, reduceres kundens vedligeholdelsesomkostninger.

Anvendelsesområderne til Compact er mange: akut beredskab, transport inden for hospitaler, på sundhedscentre, speciallæger eller tandklinikker.

Komplet løsning for Medicinsk Oxygen

- Ingen skift af regulator, dette øger sikkerhed for personale og patient.
- Et manometer som altid viser hvor meget oxygen flasken indeholder.
- Instruktion og forbrugstabel på flasken.
- Meget enkel betjening af regulator og flow.
- Praktisk og ergonomisk flaske til placering på seng eller bære.



COMPACT I Medicinsk Oxygen


Sikker, nem og økonomisk

- Compact er altid klar til brug - ingen værktøjer er nødvendige.
- Med et simpelt håndtag åbnes flasken, og derefter kan det ønskede flow indstilles. Bemærk, at hvis flasken ikke åbnes, er flow vælgeren låst.
- Bærehåndtag og ophængsordning til seng / bære er indbygget i hættens.
- Hættens udformning gør, at flasken ikke kan rulle, når den ligger ned.
- Minimal risiko for at få partikler ind i tilslutningen takket være ventilens udformning.
- Den indbyggede trykmåler viser altid, hvor meget gas der er tilbage.
- Uanset flowmængden er flowreguleringen meget nøjagtig takket være en totrins-trykregulator.

Styring af flow
0-15 l / min

Håndtag til
åbning

Bærehåndtag

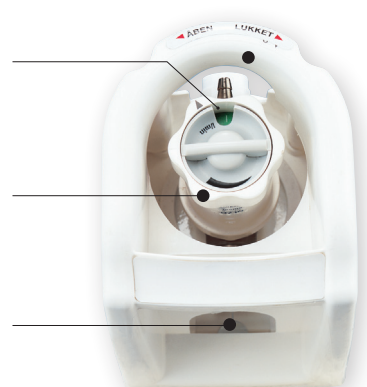

Specifikation

Tekniske data:		
Flaskestørrelse	2 liter	5 liter
Indhold	400 liter	1000 liter
Flow	0-15 liter/minut (0-1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 liter/min)	0-15 liter/minut (0-1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 liter/min)
Højde, cm	Ca 49 cm	Ca 67 cm
Vægt inkl gas, kg	5,1 kg	6,9 kg
Diameter, mm	Ca 119 mm	Ca 140 mm

Påfyldningstryk 200 bar

Nominelt udløbstryk 4,0 bar

Compact opfylder gældende standarder

Kontakt oss

Air Liquide Danmark
Høje Taastrup Vej 42
2630 Taastrup
Tlf: 43 55 50 50

www.airliquide.com/denmark

www.airliquide.com



Air Liquide Healthcare is a world leader in medical gases, home healthcare, hygiene products and healthcare specialty ingredients. It aims to provide customers in the continuum of care from hospital to home with medical products, specialty ingredients and services that contribute to protecting vulnerable lives.

ANSVARSRFRASKRIVELSE VEDRØRENDE DATABLAD Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.

DK_00820_201911_HC